



Produkterna är uppförda på Bra hjälpmedel
Produkterna är **CE** - märkta
10 år på marknaden
Hög kvalitet
Konkurrenskraftiga priser
Enkla och funktionella produkter
Omsätter idéer till produkter
Flexibel organisation
Korta leveranstider
Angivna priser är exklusive moms

Kontaktperson: Jesper Zonefalk
Värnamovägen 20
330 15 Bor
Tel. 0370 - 65 50 35
Orderfax. 0370 - 65 07 70
E-post. info@helab.se
www.helab.se



Expanderstång Brukarvägledning

implementering av FR 2000 pågår
För mer information: www.fr2000.org



Vid montering av expanderstången är det viktigt att monteringen följer nedanstående anvisningar och att justeringen av takplattan justeras ända upp mot taket innan man påbörjar att spänna stången mot taket genom att skruva den åt vänster. Montören skall förvisa sig om att stången är rätt monterad och helab tar ej ansvar för felaktig montering. Kunden och montören skall vara införstådd med att det kan uppkomma märken och färgskiftningar på golv eller tak efter att stången varit monteraden tid.


1. Placera expanderstången på önskad plats
2. Vänd expanderstången så att tryckindikatorn går att enkelt läsa av efter att stången är monterad.
3. Lossa sprinten som sitter placerad under takplattan och justera upp teleskopröret så nära taket som möjligt. Återmontera sprinten och säkra med hårnålssprinten. För att komma så nära taket som möjligt använd hål 1 eller hål 2 (bild nr 3)
4. Lossa säkerhetslåsningsen genom att skurva ratten åt vänster. (bild nr 4)
5. Vrid expanderstången åt vänster för att spänna fast stången mot taket tills tryckindikatorn är på grönt område (Bild nr 2)
6. Centra säkerhetslåsningsen rakt ovanför tryckindikatorn. Skruva in ratten ända in till botten genom att vrida åt höger. **Viktigt att säkerhetslåsningsen skruvas ända in till botten.**

Tryckområde

200 kg →
250 kg →



Sprintlåsnings

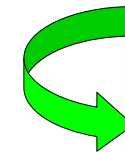


Vrid åt vänster för att spänna stången mot taket


Vrid åt höger för att lossa stången från taket



Tryckindikator

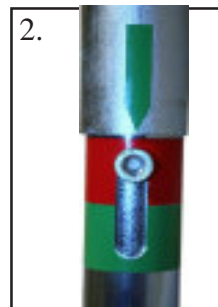

Säkerhetslåsnings

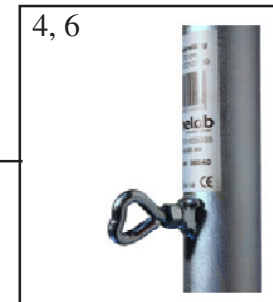

Tillbehör



Stor takplatta art nr:
570016-00



Rak grepp art nr: 570011-00



Triangelgrepp art
nr:570012-00



L-grepp art nr: 570013-00



Barr

Användningsområden för Expanderstång



Sovrum
Uppresningshjälp, ståstöd alternativt som sängdävert.



Badrum
Uppresningshjälp vid toalettstol alternativt förflyttningshjälpmedel vid badkaret.



Vardagsrum
Uppresningshjälp vid soffa eller fåtölj.



Gåträning
Barr monterad mellan två stycken expanderstänger.



Påklädning
Som stöd vid påklädning.

Rengöring

Expanderstången rengörs med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel, eftertorka med torr trasa.