


# Sängdävert Monteringsanvisning

Vid brukarvikt över 90 kg rekommenderar Helab att fixeringsdetalj används (bild 3B).  
Vid belastning av sängdävert skall den vara monterad ihop med säng.

Montera ihop sängdäverten genom att följa monteringsanvisningen från steg 1-5.

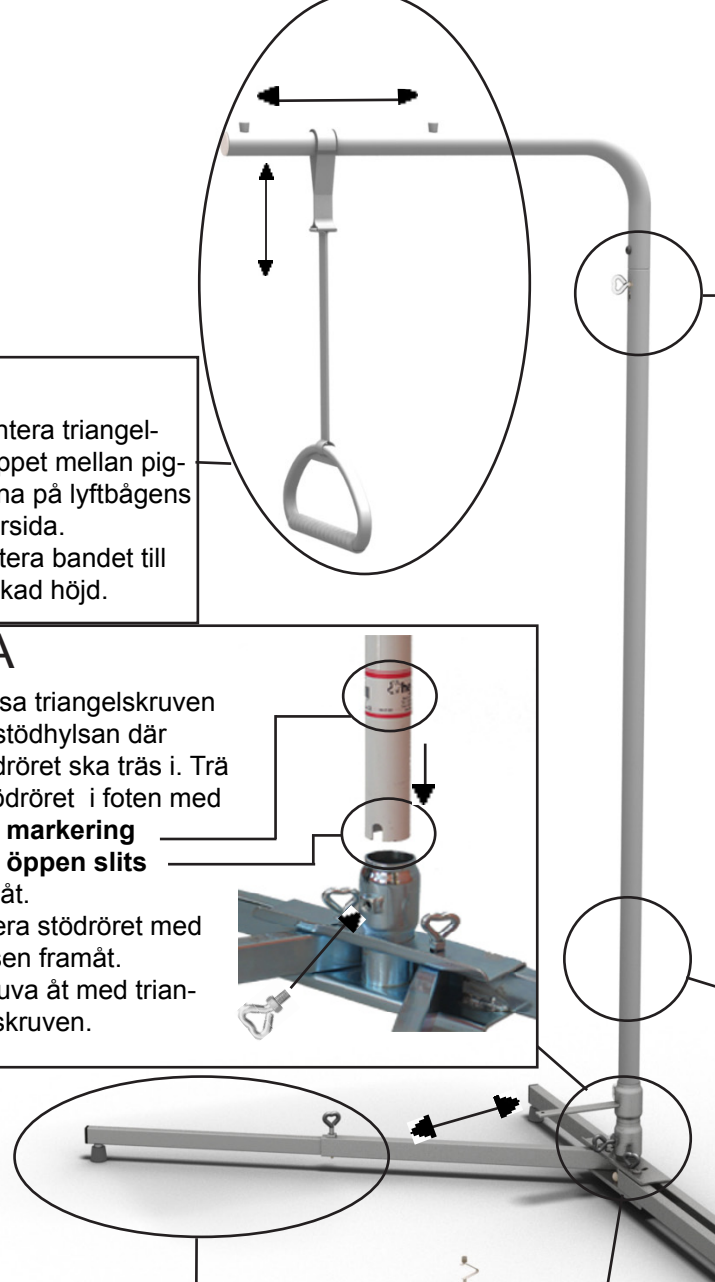

**5**  
Montera triangelgreppet mellan pigarna på lyftbågens översida. Justera bandet till önskad höjd.

**3A**  
Lossa triangelskruven på stödhylsan där stödröret ska träs i. Trä i stödröret i foten med **röd markering** och **öppen slits** nedåt. Fixera stödröret med slitsen framåt. Skruva åt med triangelskruven.

**2**  
Lossa triangelskruven ett varv. Drag ut utdragsbenen så långt som möjligt och skruva åt triangelskruven (vid max utdragsläge låser en krycklåsning på undersidan av benet).

**1**  
Lossa triangelskruvorna från håll A och fäll ut benen. Skruva tillbaks skruvorna i håll B.


**4**  
Montera lyftbågen i stödrörets övre ände och vänd den framåt. Fixera med triangelskruven i valfritt håll på stödrörets övre del. Det undre hålet fixerar lyftbågen i sidled och övre hålet gör lyftbågen svängbar om skruven inte dras åt helt. Triangelskruven skall vid användning vara monterad i något av hålen.

**3B**  
Fixeringsdetaljen monteras **vid behov** på stödrörets nedre del, före montering i benställning och spänns in under sängramen för stabilisering.

# Sängdävert

## Belastningstabell

Max belastning med fixeringsdetalj	65 kg	70 kg	75 kg
Max belastning utan fixeringsdetalj	45 kg	50 kg	55 kg

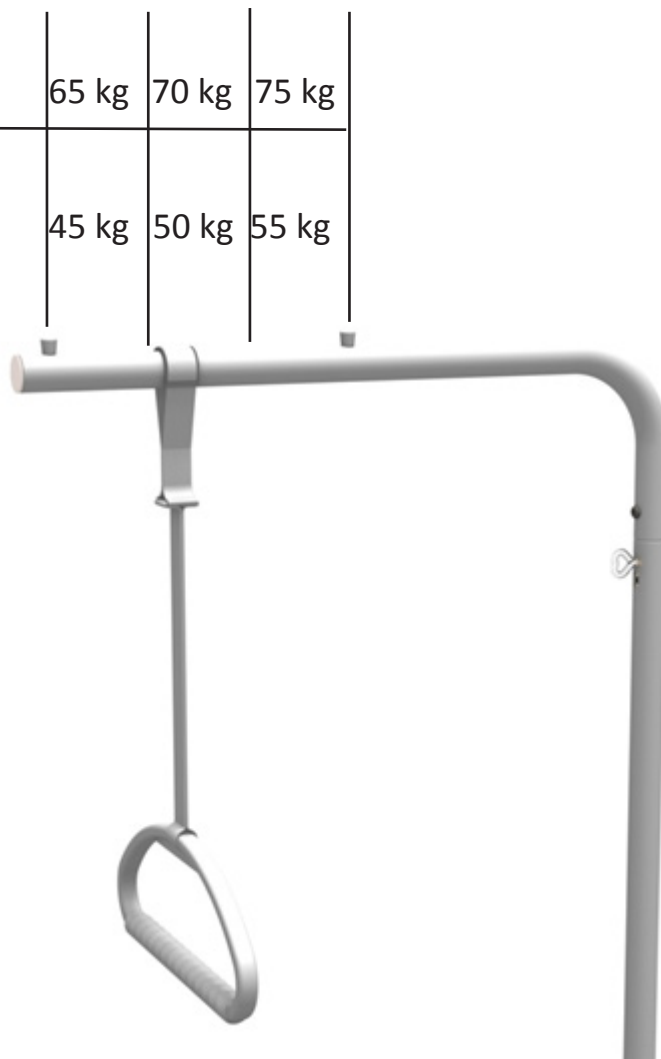

Helab Produktion AB

Box 158

512 24 Svenljunga

Tel. 0771-106 600, e-post: [info@helab.se](mailto:info@helab.se) [www.helab.se](http://www.helab.se)