

Placera dynan rätt och justera rullstolens benstöd och rygg så att brukaren sitter bekvämt.


1. Kontrollera att dynan ligger rätt i överdraget. Urtagen för ryggrören på dynan skall vara vänd mot dragkedjan d.v.s. bakåt.



2. Det svarta friktionsmaterialet på undersidan av överdraget skall vara vänd nedåt.



3. Placera därefter dynan i rullstolen med dragkedjan vänd mot rullstolens rygg. Om dynan har bendelare skall den vara vänd framåt.

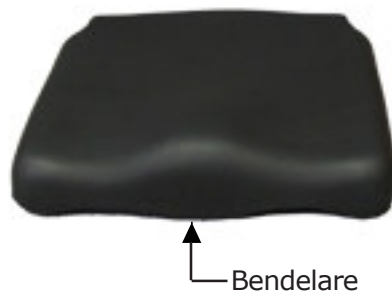

Om dynan blir utsatt för smuts, urin eller annat, så rengör Helabs dynor enligt följande rekommendationer

1. Spola/skölj av basen med kallt eller varmt vatten efter önskemål.
2. Tvätta rent basen med tvål, sprit eller annat rengöringsmedel t.ex. virkon. basens svarta ytskikt tål alla typer av rengöringsmedel. Använd en mjuk tvättsvamp eller liknande. Undvik hårda eller vassa föremål. Basen skall vara torr innan överdraget återmonteras
3. Tvätta överdraget i tvättmaskin i 60 grader, vid behov går det att tvätta i 70 - 90 grader
4. Torka överdraget innan det återmonteras.

Helabs dynor är vätsketäta. Vid inkontinens räcker det med att man tvättar dynan enligt ovanstående tvättråd. Inkontinensöverdrag är ej nödvändigt för att skydda basen. Dock kan två kompletta dynor eller ett extra överdrag användas.



Etikett bak på överdraget med tvättråd som avser överdraget



Etikett på basens ovansida med tvättråd som avser basen