

## BlueBoard



Glidbrädan BlueBoard underlättar förflyttning mellan rullstol, säng, stol, bil med mera. Den böjda formen gör att användaren lättare kommer förbi hinder, såsom armstöd och bromsar på rullstolen samt hjälper användaren att komma mer i centrum på sitsen. BlueBoard är utformad med avfasade kanter och antiglid på undersidan för att brädan ska bli enklare och säkrare att använda.

Innan produkten används kontrollera att produkten är hel. Placera Blueboard mellan till exempel rullstol och säng. Kontrollera därefter att Blueboard ligger stabilt och säkert innan förflyttning sker. Vid förflyttning från/till rullstol kontrollera att rullstolens bromsar är låsta.

Glidbrädan BlueBoard rengörs med ljummet vatten och mild tvållösning och torkas sedan av med en handduk. Om brädan blir statiskt laddad, torka av med en fuktad trasa.

### **Materialspecifikation räknad på BlueBoards totala vikt:**

99% Polyeten

0,5% Bunden slipsten

**Emballage:** 0,5% PELD 04

Upphandlad på HI avtal 1642.

Uppförd på Bra hjälpmedel.

HI klassificeringskod/rubrik: 12 30 03 Glidbrädor och glidmattor.

Produkten är återvinningsbar, sorteras som hårdplast. Antihalktejp sorteras som brännbart material. Emballage kan återvinnas, sorteras som mjukplast.



Dokument ID: 990009-00