

## Rullstolsbord



Helab tillverkar rullstolsbord i 5 mm rökfärgad/klar akryl, som är i fasta mått för olika fabrikat av rullstolar.

Innan rullstolsbordet används på rullstolen kontrollera att bordet ej har några skador. Vid skador på bordet som till exempel sprickor eller kantstötning rekommenderas att bordet kasseras, eftersom eventuella sprickor kan "vandras" och medföra en risk för klämning eller skärsår. Kontrollera att rullstolen är lämpad för montering av denna typ av rullstolsbord. Se rullstolens bruksanvisning eller ta kontakt med rullstolstillverkaren, (denna information kan i vissa fall lämnas av hjälpmedelskonsulenterna inom kommun och landsting).

Bordet skall träs på armstöden framifrån med den plana sidan uppåt och urtaget vänt mot brukaren. Rullstolen ska ha långa armstödplattor. Bordet ska träs på till minst hälften av bordets djup på armstöden. Bord ska inte vara påmonterat på rullstol vid transport i fordon. Iaktta försiktighet om rullstolen är utrustad med hjälpmotor. Viss klämrisk kan föreligga.

### **Max belastning: 20 kg**

Vid rengöring används mildt rengöringsmedel och ljummet vatten.

**Material specifikation räknat på ekerskyddets totala vikt:**  
99,5% Miljögodkänd PVC utan mjukmedel och farliga tungmetaller.  
**Emballage:** 0,5% PELD 04

Upphandlad på HI avtal 1642.  
Uppförd på Bra hjälpmedel.  
HI klassificeringskod/rubrik: 12 24 15 Rullstolsbord.  
Produkten är återvinningsbar, sorteras som hårdplast.  
Emballaget är återvinningsbart sorteras som mjukplast.



Dokument ID: 990008-00